

QPoint™ Benutzerhinweise

Diese Wasserentnahmestelle ist mit einer Pall QPoint Filtereinheit zur Verwendung an Wasserhähnen ausgerüstet, um mikroorganismenfreies Wasser zu bieten.



Halten Sie beim Händewaschen einen ausreichenden Abstand zur Filterkapsule ein.



Nicht berühren.



Nicht reinigen.



Nicht entfernen.

Beachten Sie die Daten der Filterinstallation und des Filterwechsels.

Fehlersuche und Fehlerbehebung

An der Verbindungsstelle zwischen Andockstation und Filterkapsule tritt Wasser aus

Stellen Sie sicher, dass die O-Ring-Dichtung an der Andockstation richtig sitzt und intakt ist. Überprüfen Sie, ob die Filterkapsule vollständig in die Andockstation eingerastet ist. Versuchen Sie hierfür die angebrachte Filterkapsule nach links zu drehen. Wenn sie korrekt eingerastet ist, sollte sie sich nicht drehen lassen.

Die Filterkapsule lässt sich nicht von der Andockstation abnehmen

Stellen Sie sicher, dass der Entsicherungsknopf an der Andockstation vollständig angehoben wurde. Beim Abnehmen der Filterkapsule von einer QPoint Andockstation für Wasserhähne mit Schnellkupplung muss die Andockstation festgehalten werden, damit sie sich nicht mitdreht. Greifen Sie die Filterkapsule und drehen Sie sie zum Abnehmen nach links.

Der Wasserfluss durch die Filterkapsule ist langsam

Falls die Filterkapsule dekonnektiert wurde, kann Luft eingedrungen sein und die Membran teilweise verschlossen haben, wodurch sich die Flussrate des Wassers signifikant verringern kann. In diesem Fall sollten Sie eine neue Filterkapsule einsetzen. Falls Sie die Filterkapsule nicht abgenommen haben, ist es möglich, dass die Reduzierung der Durchflussleistung durch eine hohe Kontamination des Wasserleitungssystems mit Partikeln, Rost oder Mikroorganismen verursacht ist. Diese Partikelkontamination kann vorübergehend und/oder durch Wartungs- oder Baumaßnahmen am Wassersystem bedingt sein. Wenn die Flussrate zu niedrig wird, sollte eine neue Filterkapsule eingesetzt werden. Gegebenenfalls erkundigen Sie sich bei Ihrem Pall-Vertreter oder Fachhändler nach einem geeigneten Vorfiltrationssystem.

Die Filterkapsule wurde ausgetauscht, aber die Flussrate ist noch immer niedrig

Überprüfen Sie, ob die Filterkapsule vollständig in die Andockstation eingerastet ist. Die Flussrate durch die Filterkapsule hängt vom Wasserdruck ab. Ein Wasserdruck von weniger als 1 bar kann

möglicherweise eine ausreichende Flussrate nicht gewährleisten. Bitte wenden Sie sich an Ihre technische Abteilung oder an einen Installateur, um in Erfahrung zu bringen, ob der Wasserdruck erhöht werden kann.

Die Filterkapsule ist auf den Boden gefallen. Kann sie noch verwendet werden?

Nein, Sie müssen eine neue Filterkapsule verwenden.

Von der Anströmseite des Filters werden unfiltrierte Wasserproben zur Überprüfung der Wasserqualität benötigt

Wenn vor dem Einsetzen einer neuen Filterkapsule eine Wasserprobe benötigt wird, entfernen Sie die vorhandene Filterkapsule und entsorgen Sie sie nach den geltenden Vorschriften. Nehmen Sie die Andockstation und gegebenenfalls die Schnellkupplung ab, damit Wasser aus dem Wasserauslass austreten kann. Entnehmen Sie die Wasserprobe(n) nach den lokalen Richtlinien. Schließen Sie die Andockstation unverzüglich wieder an und installieren Sie eine neue Filterkapsule.

An wen kann ich mich wenden, wenn Probleme auftreten?

Beim Auftreten eines Problems, das Sie nicht selbst lösen können, sehen Sie unter www.pall.com/QPoint nach und/oder wenden Sie sich an Ihre Pall-Vertretung oder Ihren Fachhändler, um sich beraten zu lassen und ggf. das Produkt/die Produkte für weitere Untersuchungen einzuschicken. Zurückzusendende Produkte müssen in einen wiederverschließbaren Beutel gelegt werden. Beachten Sie bitte die Rücknahmeanweisungen Ihrer Pall-Vertretung bzw. Ihres Fachhändlers.



Pall International Sàrl
Avenue de Tivoli 3
1700 Fribourg, Switzerland

Lokales Verkaufsbüro
Pall GmbH
Philipp-Reis-Straße 6
D-63303 Dreieich
(0 61 03) 30 70 Telefon
(0 61 03) 30 75 56 Fax
LifeSciences.EU@pall.com E-mail

Pall (Schweiz) AG
Schäferweg 16
CH-4057 Basel
(61) 63839-11 Telefon
(61) 63839-40 Fax

Pall Austria Filter GmbH
Handelskai 94-96, TOP 422
1200 Vienna
Austria
Phone: ++43 1 49192 0
Fax: ++43 1 49192 400
Email: Pall-Austria-Office@europe.pall.com